

Kera-Sep Spray

Anwendungsbereich:

Separierspray für die Keramik. Zum Isolieren von Modellen und aufgetragener Keramikmasse. Bei Verwendung der Silikonaufläichen Okkluflex (DFS-Diamon GmbH)

Anwendungsweise:

Vor Gebrauch gut schütteln.

Nach einmaligem Aufsprühen aus ca. 5-8 cm ca. 1 Minute warten, dann ein 2. Mal auftragen. Nur kurze Sprühstöße tätigen, Pfützenbildung, z.B. in tieferen Alveolen, vermeiden. Ein gezielter Auftrag mittels Pinsel ist ebenfalls möglich.

Qualität:

Kera-Sep Spray gewährleistet ein sicheres Isolieren von Modelloberflächen zu aufgetragener Keramik und ermöglicht ein problemloses Abheben der Modellation für den Brennvorgang. Keine Gefahr einer Kreuzkontamination wie bei Pinselflaschen. Etwa anhaftendes Liquid verbrennt rückstandslos.

Risiken:

Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel.

Lagerung:

- Dose steht unter Druck.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Vor Erwärmung über 50°C schützen.

Entsorgung:

Mit den allgemeinen Laborabfall (Blechdosen)

Hersteller:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14