

Okklean und Telescan

Anwendungsbereich:

Für extraorale Anwendung!

Okklusionspray

Zum Sichtbarmachen von Frühkontakten und für Passungsarbeiten bei Kronen und Brücken.

Telescan

Für Passungsarbeiten bei Teleskop- und Geschiebearbeiten sowie Deflektierung glänzender Flächen als Vorbereitung eines Scanvorganges

Anwendungsweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand ca. 3-10 cm. Sanfte, intermittierende kurze Sprühstöße bei gleichzeitiger Drehung des zu besprühenden Objekts. Kein deckender Auftrag erforderlich. Lässt sich leicht wieder mittels Pinsel, Wasserdampf bzw. unter fließendem Wasser wieder entfernen. Es ist keine Verfärbung des Gipses zu befürchten.

Qualität:

Ultrafeiner Sprühnebel. Entgegen üblicher Okklusionssprays sind Okklean und Telescan nicht wasserlöslich; somit besteht keine Verfärbungsgefahr der Gipsmodelle durch aufgesaugtes gefärbtes Wasser.

Risiken:

Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel.

Lagerung:

- Dose steht unter Druck.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen, Explosionsgefahr
- Vor Erwärmung über 50°C schützen.

Entsorgung:

Mit dem allgemeinen Laborabfall (Blechdosen)

Hersteller:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14