

Okkluflex

Ambito d'uso:

Realizzazione rapida e razionale di superfici masticatorie anatomiche in cera, ceramica, composito.

Modo d'uso:

Scegliere lo stampo e controllare la larghezza del dente. Creare il primo strato di cera come di consueto (immersione in cera). Riempire velocemente lo stampo in silicone con la cera per modellazione. Lasciare rapprendere leggermente. Mentre la cera è ancora morbida, mettere lo stampo sul moncone e posizionarlo correttamente, fissandolo con della cera se necessario. Controllare l'antagonista in articolatore. Dopo l'indurimento della cera, staccare con cautela lo stampo in silicone. Completare la forma anatomica del dente e, in base alle necessità, modificare o adattare la superficie occlusale.

Si consiglia di seguire un procedimento analogo per la realizzazione di superfici masticatorie in ceramica o composito.

Per staccare lo stampo dalla superficie masticatoria in ceramica senza problemi, isolare lo stampo in silicone con Kera-Sep Spray (DFS- Diamon GmbH) prima di riempirlo con la massa ceramica.

Nel caso si utilizzino compositi, preferire quelli fotopolimerizzabili, dato che la trasparenza del silicone ne rende l'indurimento molto semplice. In questo caso non è necessario utilizzare l'isolante.

Qualità:

Stampi in silicone sottili, altamente flessibili, resistenti agli strappi e trasparenti con codice di riferimento della posizione del dente per il riutilizzo. Forma anatomica.

Fattori di rischio:

Nessuno.

Smaltimento:

Come rifiuti generici di laboratorio.

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14