

Plastodur

Anwendungsbereich:

Erhöht die Wirkung von Isoliermitteln und verhindert Abrasion (z.B. Antagonistenkontakte bei Artikulationsbewegungen).

Anwendungsweise:

- Mit Pinsel 1 - 2 mal nach Bedarf unverdünnt auftragen.
- Kratzfest nach 15 min.
- Hochfest nach 30 min.

Schutzmaßnahmen:

Für ausreichende Luftzufuhr sorgen.

Eigenschaften:

Schnell härtend, kratzfest, wasserabweisend

Haltbarkeit:

2 Jahre

Lagerung:

- Bei konstanter Temperatur nicht über 35°C.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Vor Frost schützen.

Achtung:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen!

Hersteller:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14