

## Plastodur

### **Ambito d'uso:**

Aumenta l'efficacia dell'isolante e impedisce l'abrasione  
(es. contatto con gli antagonisti durante i movimenti di articolazione)

### **Modo d'uso:**

- Stendere con un pennello 1 - 2 volte, a seconda delle necessità, il prodotto non diluito.
- Resistente ai graffi dopo 15 min.
- Completamente indurito dopo 30 min.

### **Precauzioni:**

Assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia sufficientemente ventilato.

### **Proprietà:**

Indurisce velocemente, resistente ai graffi, idrorepellente.

### **Durata:**

2 anni

### **Conservazione:**

- Conservare a temperatura costante non superiore ai 35°C.
- Non esporre ai raggi diretti del sole.
- Proteggere dal gelo.

### **Attenzione:**

Non scaricare nella rete fognaria!

### **Produttore:**

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14