


UPOFIX® - POLIERER

Bürsten	Anwendung	Anwendungsgebiet
0	Polieren	alle Metalle
I	Vorpolieren	alle Metalle
II	Glanzpolieren	alle Metalle
III	Vorpolieren	Keramik
IV	Glanzpolieren	Keramik
IV	Vorpolieren	Komposite
V	Glanzpolieren	Komposite

Achtung: 3' – 5.000 UpM (langsam mit erhöhtem Anpressdruck)

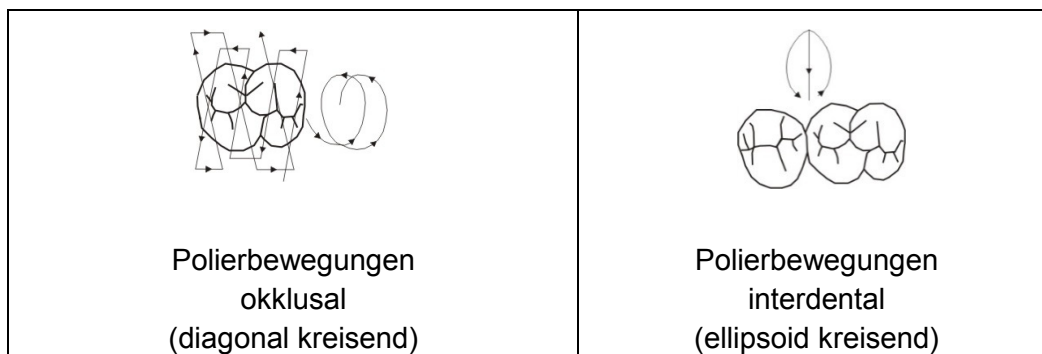

Langsame Drehzahlen - 3000 UpM und erhöhter Anpressdruck: Abrasives (Vor-)Polieren

Erhöhte Drehzahlen 3000-5000 UpM mit leichten bis keinem Druck: Endpolitur.

Weiteres siehe Beschreibung im Labor-Katalog

Hersteller:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 12/14