

## Instrumentos de zirconio

### Indicación:

Contorneado y pulido de zirconio sinterizado y cerámica de disilicato de litio. Tratamiento de zirconio en estado de tiza.

### Regla general:

**Los instrumentos requieren de refrigeración por agua 💧 si las partículas de diamante son visibles a simple vista ! Evitar chispas durante el procesamiento.**

### Aplicación:

#### ***Procesamiento de zirconio con efecto modelador***

Sidia FG	turbina de laboratorio -300000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
FG Instrumentos para zirconia	turbina de laboratorio -300000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
Diamantes para pieza de mano para zirconio	Pieza de mano 5' – 30000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
Circool Lab XL	800161 // Pieza de mano 5' - 25000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
	800162 // Pieza de mano 5' - 20000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
	800163 // Pieza de mano 5' - 25000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
	800162 // Pieza de mano 5' - 8000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧

Circool Lab	800140 // Pieza de mano 3' - 18000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
	800148 // Pieza de mano 3' - 4000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
	800142 // Pieza de mano 3' - 6000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧
	800146 // Pieza de mano 3' - 5000 r.p.m., ligera presión de contacto	💧

#### ***Prepulido de zirconio***

Circool Lab	800133 Pieza de mano 3' - 15000 r.p.m., mediana presión de contacto	💧
	800135 Pieza de mano 3' - 15000 r.p.m., mediana presión de contacto	💧
	800137 Pieza de mano 3' - 8000 r.p.m., mediana presión de contacto	💧
	800131 Pieza de mano 3' - 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	💧

#### ***Pulido de alto brillo zirconio***

Circopol Lab	800138 // Pieza de mano 3' - 15000 r.p.m., mediana presión de contacto	💧
	800136 // Pieza de mano 3' - 10000 r.p.m., mediana presión de contacto	💧

### Riesgos:

Evite la inhalación de polvos de cerámica!

### Fabricante:

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 11/14