

## Gewebestanze

### **Anwendungsbereich:**

Weichgewebestanze zum Schneiden von definierten Gingivaöffnungen für das lappenfreie, enossale Einbringen von Implantaten; Biopsie von Weichgewebe. Zum ausschließlichen Gebrauch in zahnärztlichen Winkelstücken.

### **Anwendungsweise:**

Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) siehe separate Aufbereitungsanweisung.

Es ist darauf zu achten, dass das Instrument mit einem Winkel von ca. 90° zur Gingiva an diese angesetzt wird. Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen von 300 min<sup>-1</sup> (UpM) einhalten. Die Rundschneide ist auf Unversehrtheit hin zu überprüfen. Weist die Schneide Verletzungen, Unregelmäßigkeiten oder Abnutzungserscheinungen auf, darf das Instrument nicht weiter verwendet werden und ist klinikgerecht zu entsorgen. Stellen Sie sicher, dass das Instrument fest in der Arretierung der Aufnahme des Arbeitskopfes des Winkelstückes verriegelt ist. Wir empfehlen die Anwendung von ausreichender Wasserkühlung. Hinweise des Herstellers der Antriebseinheit sind zu beachten.

### **Qualität:**

Profilkörper aus gehärtetem rostbeständigem chirurgischem Stahl 1.4112

### **Risiken:**

Bei sach- und fachgerechtem Gebrauch sind keine Risiken vorhanden

### **Entsorgung:**

Unbrauchbare Instrumente sind vor einer klinikgerechten Entsorgung zu sterilisieren

### **Hersteller:**

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890