

Gebrauchsanweisung

Copyright by DFS-Diamon GmbH

Seite 1 / 1

Fluxur

Erstelldatum: 07.11.2013

Überarbeitet am: / /



*Beispielabbildung

Produktname

Fluxur, Flussmittel für alle Dentallegierungen

Zusammensetzung

Komplexes Kalium-Hydroxo-Fluoroborat

Anwendungsweise

Kronen- und Brückentechnik, Modellguss

Verarbeitung

Die zu lötende Stelle metallisch blank vorbereiten. Vor dem Erhitzen mit der Flamme ausreichend Fluxur auf die warme Lötstelle aufbringen. Bis zur Rotglut weitererhitzen, wenn nötig Fluxur nachlegen. Lot auflegen, in die Lötfläche einschließen lassen und kurz nachwärmen.

Nach langsamer Abkühlung das verglaste Flussmittel mechanisch (Schleifen, Sandstrahlen) entfernen, kein Abbeizmittel verwenden!

Hierzu eignen sich rotierende Stahldrahtbürsten bestens. (Best. Nr. 60014)

Rev. 11/13



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany