

Gebrauchsanweisung

Copyright by DFS-Diamon GmbH

Seite 1 / 1



Kera-Sep Spray

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am: / /



*Beispielabbildung

Anwendungsbereich

Separierspray für die Keramik. Zum Isolieren von Modellen und aufgetragener Keramikmasse. Bei Verwendung der Silikonaufläichen Okkluflex (DFS-Diamon GmbH).

Anwendungsweise

Vor Gebrauch gut schütteln.

Nach einmaligem Aufsprühen aus ca. 5-8 cm ca. 1 Minute warten, dann ein 2. Mal auftragen. Nur kurze Sprühstöße tätigen, Pfützenbildung, z.B. in tieferen Alveolen, vermeiden. Ein gezielter Auftrag mittels Pinsel ist ebenfalls möglich.

Qualität

Kera-Sep Spray gewährleistet ein sicheres Isolieren von Modelloberflächen zu aufgetragener Keramik und ermöglicht ein problemloses Abheben der Modellation für den Brennvorgang. Keine Gefahr einer Kreuzkontamination wie bei Pinselflaschen. Etwa anhaftendes Liquid verbrennt rückstandslos.

Risiken

Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel.

Lagerung

- Dose steht unter Druck.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Vor Erwärmung über 50 C schützen.

Entsorgung

Mit dem allgemeinen Laborabfall (Blechdosen)

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany