

## Utilizați exclusiv la tehnica modelării cu ceară (nu la capele prin imersiune în ceară)!

Aceste date sunt valabile numai pentru utilizarea sistemului **Thermofix 2000**


**Date referitoare la 160g!**

**Componente:**

- 1) Vestofix (masă de ambalare)
- 2) Conformator conic
- 3) Șină
- 4) Thermofix (folie inelară)
- 5) Spray siliconic
- 6) Niadur, BiodurSoft, sau similare

Aliaje nobile Ni-Cr, Co-Cr
<b>160 g = 38 ml</b>
11 ml H <sub>2</sub> O → 27 lichid de expansiune <b>(potrivire exactă)</b>
13 ml H <sub>2</sub> O → 25 ml lichid de expansiune <b>(potrivire strictă)</b>

38 ml = 100%		
Lichid		H <sub>2</sub> O dest.
ml	Procent	ml
15	ca.39%	23
16	ca.42%	22
17	ca.45%	21
18	ca.47%	20
19	ca.50%	19
20	ca.53%	18
21	ca.55%	17
22	ca.58%	16
23	ca.60%	15
24	ca.63%	14
25	ca.66%	13
26	ca.68%	12
27	ca.71%	11
28	ca.74%	10
29	ca.76%	9
30	ca.79%	8

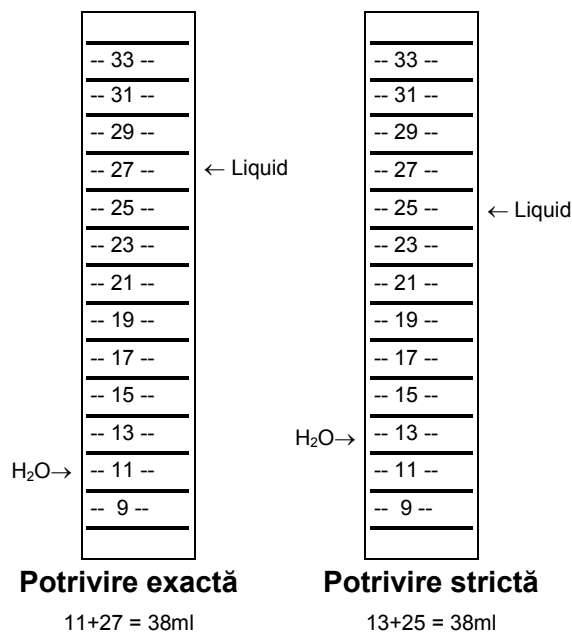

**cu 1ml mai mult lichid de expansiune = cu 3% expansiune mai mare**

Alte informații prin mail: [info@dfs-diamon.de](mailto:info@dfs-diamon.de)

### **Producător:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 11/14