

## VESTOFIX

**Extra finom foszfátkötésű beágyazó massa nem nemesfémekhez és ráégetett ötvözetekhez**

A VESTOFIX a gyors és a hagyományos eljárásban is használható (azaz éjszakai előmelegítésnél).

### **Fontos:**

Ez a beágyazó massa hosszú, 25 perces megkötési fázisú. Ebből eredően egyenletes a megkötési folyamat, kevesebb a kérés és jobb az illeszkedés.

**Ne nyissa ki a kemencét az első 15 percben! A láng kicsaphat!**

**Figyelem: A Thermofix-rendszerrel feltétlenül vegye figyelembe a különleges használati útmutatót!**

### **Feldolgozási felhívások:**

Feldolgozási hőmérséklet	Tágító folyadék + por 18–20 °C
Gyors eljárás keverési aránya	60 – 180s vákuum alatt
Feldolgozási idő	kb. 6 min.
Kötési idő	kb. 25 min.
Likvidkoncentráció	Kb. 90–100% Co-Cr ötvözetnél (a mindenkori Co-Cr ötvözettől függ)

**Javasoljuk desztillált víz használatát!**

### **Előmelegítési idő:**

**a) Szokványos (egy éjszaka alatti) / Regular (over night):**

A keverés kezdete után 40 perccel állítsa a bevonatot a hideg kemencébe

Felfűtési sebesség 5–9 °C/perc lineárisan

**b) Gyors eljárás / Speed Process:**

40 max. 45 perc elteltével állítsa a bevonatot a 900 °C-ra felmelegített kemencébe és hagyja kiégetni.

## VESTOFIX

### Kemencében eltöltött idő:

1-es méretű bevonat	kb. 20 min.
3-as méretű bevonat	kb. 30 min.
6-os méretű bevonat	kb. 50 min.
9-es méretű bevonat	kb. 60 min.

### Tárolás:

Nedvességtől és hőtől védendő.

További tájékoztatás e-mailen keresztül: [info@dfs-diamon.de](mailto:info@dfs-diamon.de)

### Gyártó:

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 09/14