

## Fluxur

**Produktname:**

Fluxur, Flussmittel für alle Dentallegierungen

**Zusammensetzung:**

Komplexes Kalium-Hydroxo-Fluoroborat

**Anwendungsbereich:**

Kronen- und Brückentechnik, Modellguss

**Verarbeitung:**

Die zu lötende Stelle metallisch blank vorbereiten. Vor dem Erhitzen mit der Flamme ausreichend Fluxur auf die warme Lötstelle aufbringen. Bis zur Rotglut weitererhitzen, wenn nötig Fluxur nachlegen. Lot auflegen, in die Lötfläche einschließen lassen und kurz nachwärmen.

Nach langsamer Abkühlung das verglaste Flussmittel mechanisch (Schleifen, Sandstrahlen) entfernen, kein Abbeizmittel verwenden!

Hierzu eignen sich rotierende Stahldrahtbürsten bestens. (Best. Nr. 60014)

**Hersteller:**

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/13