

Gebrauchsanweisung

Gewebestanze

Anwendungsbereich:

Weichgewebestanze zum Schneiden von definierten Gingivaöffnungen für das lappenfreie, enossale Einbringen von Implantaten; Biopsie von Weichgewebe. Zum ausschließlichen Gebrauch in zahnärztlichen Winkelstücken.

Anwendungsweise:

Die Werkzeuge sind **vor und nach** jedem Gebrauch fach- und sachgerecht zu desinfizieren, zu reinigen und zu sterilisieren. Unmittelbar nach deren Anwendung müssen die Instrumente vordesinfiziert werden. Dies geschieht durch vollständiges Eintauchen in ein Desinfektionsbad (Fräsator) mit vom Hersteller der Reinigungslösung vorgeschriebener Verweildauer. Nach der Desinfektion sind die Instrumente unter fließendem Wasser gründlich abzuspülen. Die darauffolgende mechanische Reinigung (z.B. Bürste, fließendes Wasser) entfernt noch anhaftende Gewebereste. Beste Ergebnisse werden durch eine Behandlung im Ultraschallbad erreicht. Zur Sterilisation empfehlen wir ein Autoklav-Verfahren bei +134°C mit 2,2 bar Druck bei einer Haltezeit von mindestens 5 Minuten. Verfahren mit Temperaturen über 180°C sind ungeeignet und nicht zu verwenden. Es sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller der verwendeten Materialien und Geräte zu beachten.

Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen von 300 min⁻¹ (UpM) einhalten. Die Rundschneide ist auf Unversehrtheit hin zu überprüfen. Weist die Schneide Verletzungen, Unregelmäßigkeiten oder Abnutzungserscheinungen auf, darf das Instrument nicht weiter verwendet werden und ist klinikgerecht zu entsorgen. Stellen Sie sicher, dass das Instrument fest in der Arretierung der Aufnahme des Arbeitskopfes des Winkelstückes verriegelt ist. Wir empfehlen die Anwendung von ausreichender Wasserkühlung. Hinweise des Herstellers der Antriebseinheit sind zu beachten.

Qualität:

Profilkörper aus gehärtetem rostbeständigem chirurgischem Stahl 1.4112

Risiken:

Bei sach- und fachgerechtem Gebrauch sind keine Risiken vorhanden

Lagerung:

Sterile Aufbewahrung in der gelieferten Verpackung oder in geeigneten abdeckbaren Trays. Aufgrund der scharfen Schneiden empfehlen wir von einer Lagerung in Kunststoffbeuteln abzusehen

Entsorgung:

Unbrauchbare Instrumente sind vor einer klinikgerechten Entsorgung zu sterilisieren

Hersteller:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 06/15