

Clean-Orange Orangen Reiniger

Anwendungsbereich:

Oberflächenreinigung von Labor –und Praxismöbeln und Edelstahlflächen; Vorsicht: kann einige Kunststoffe anlösen, Reinigung von Abdrucklöffeln

Anwendungsweise:

Verdünnung mit Wasser, je nach Verschmutzungsgrad

Qualität:

Beseitigt Reste von Silikon, Alginat und Zink-Eugenal-Pasten und Blut. Nicht geeignet zum Einsatz im Ultraschallbad.

Risiken:

Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen, Haut und Augenkontakt vermeiden, kann Hautreizungen hervorrufen.

Entsorgung:

Pur nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Hersteller:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14