

700 Gebrauchsanweisung

Gewebestanze

**Anwendungs-
bereich:**

Weichgewebestanze zum Schneiden von definierten Gingivaöffnungen für das lappenfreie, enossale Einbringen von Implantaten; Biopsie von Weichgewebe. Zum ausschließlichen Gebrauch in zahnärztlichen Winkelstücken.

Anwendungsweise:

Die Werkzeuge sind **vor jedem Gebrauch** zu sterilisieren. Wir empfehlen ein Autoklav-Verfahren bei +134° mit 2,2 bar Druck und einer Haltezeit von mindestens 5 Minuten.

Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen von 300 min⁻¹ (UpM) einhalten.

Die Rundschneide ist auf Unversehrtheit hin zu überprüfen. Weist die Schneide Verletzungen, Unregelmäßigkeiten oder Abnutzungserscheinungen auf, darf das Instrument nicht weiter verwendet werden und ist klinikgerecht zu entsorgen. Stellen Sie sicher, dass das Instrument fest in der Arretierung der Aufnahme des Arbeitskopfes des Winkelstückes verriegelt ist. Wir empfehlen die Anwendung von ausreichender Wasserkühlung. Hinweise des Herstellers der Antriebseinheit sind zu beachten.

Qualität:

Profilkörper aus gehärtetem rostbeständigem chirurgischem Stahl 1.4112

Risiken:

Bei sach- und fachgerechtem Gebrauch sind keine Risiken vorhanden

Lagerung:

Sterile Aufbewahrung in der gelieferten Verpackung oder in geeigneten abdeckbaren Trays. Aufgrund der scharfen Schneiden empfehlen wir von einer Lagerung in Kunststoffbeuteln abzusehen

Entsorgung:

Unbrauchbare Instrumente sind vor einer klinikgerechten Entsorgung zu sterilisieren

Hersteller:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14

CE 0297