

## Gebrauchsanweisung

### Polierer

#### Anwendungs

##### bereich:

Politur von Zahnschmelz und dentalen Füllungsmaterialien.  
Anwendung nur auf Zahnschmelz. Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Zahnfleisch.

#### Anwendungs

##### weise:

Die Werkzeuge sind **vor jedem Gebrauch** zu sterilisieren. Wir empfehlen ein Autoklav-Verfahren bei +134° mit 2,2 bar Druck und einer Haltezeit von mindestens 5 Minuten.

Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen auf der Verpackung (UpM) einhalten. Eine Nichtbeachtung der maximalen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.

Hohe Temperaturen sind zu vermeiden, Gefahr einer Pulpenschädigung.

Nur in vorgeschriebener Richtung/Weise verwenden.

Es wird empfohlen, einen Mundschutz und eine Schutzbrille zu tragen.

Polierzeit maximal 15 Sekunden. Intermittierende bzw. tupfende Arbeitsweise. Wasserkühlung erforderlich.

Kein weiteres Poliermedium erforderlich.

Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers des Mikromotors/Turbine

##### Qualität:

Polyurethanpolierer mit integriertem Poliermittel

##### Risiken:

Es sind keine allergischen Reaktionen von Patienten bekannt.

##### Entsorgung:

Gebrauchte Instrumente sind mit dem allgemeinen Klinikabfall zu entsorgen

##### Hersteller:

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstrasse 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 02/14

CE 0297