

## Gebrauchsanweisung

### Polierer

#### Anwendungs

##### bereich:

Politur von Zahnschmelz und dentalen Füllungsmaterialien.  
Anwendung nur auf Zahnschmelz. Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Zahnfleisch.

#### Anwendungs

##### weise:

Die Werkzeuge sind vor und nach jedem Gebrauch fach- und sachgerecht zu desinfizieren, zu reinigen und zu sterilisieren. Unmittelbar nach deren Anwendung müssen die Instrumente vordesinfiziert werden. Dies geschieht durch vollständiges Eintauchen in ein Desinfektionsbad (Fräsator) mit vom Hersteller der Reinigungslösung vorgeschriebener Verweildauer. Nach der Desinfektion sind die Instrumente unter fließendem Wasser gründlich abzuspülen. Die darauffolgende mechanische Reinigung (z.B. Bürste, fließendes Wasser) entfernt noch anhaftende Gewebereste. Beste Ergebnisse werden durch eine Behandlung im Ultraschallbad erreicht. Zur Sterilisation empfehlen wir ein Autoklav-Verfahren bei +134°C mit 2,2 bar Druck bei einer Haltezeit von mindestens 5 Minuten. Verfahren mit Temperaturen über 180°C sind ungeeignet und nicht zu verwenden. Es sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller der verwendeten Materialien und Geräte zu beachten.

Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen auf der Verpackung (UpM) einhalten. Eine Nichtbeachtung der maximalen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.

Hohe Temperaturen sind zu vermeiden, Gefahr einer Pulpenschädigung.  
Nur in vorgeschriebener Richtung/Weise verwenden.

Es wird empfohlen, einen Mundschutz und eine Schutzbrille zu tragen.

Polierzeit maximal 15 Sekunden. Intermittierende bzw. tupfende Arbeitsweise.  
Wasserkühlung erforderlich.

Kein weiteres Poliermedium erforderlich.

Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers des Mikromotors/Turbine

##### Qualität:

Polyurethanpolierer mit integriertem Poliermittel

##### Risiken:

Es sind keine allergischen Reaktionen von Patienten bekannt.

##### Entsorgung:

Gebrauchte Instrumente sind mit dem allgemeinen Klinikabfall zu entsorgen

##### Hersteller:

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstrasse 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 06/15