

## 700 Gebrauchsanweisung Polierer

### Anwendungsbereich:

Politur von Zahnschmelz und dentalen Füllungsmaterialien.  
Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Zahnfleisch.

### Anwendungsweise:

Die Werkzeuge sind **vor jedem Gebrauch** mittels einem Heißdampfverfahren bei +134°C 3-10 Minuten zu sterilisieren.

Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen auf der Verpackung (UpM) einhalten. Eine Nichtbeachtung der maximalen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Hohe Temperaturen sind zu vermeiden, Gefahr einer Pulpenschädigung. Nur in vorgeschriebener Richtung/Weise verwenden. Es wird empfohlen, einen Mundschutz und eine Schutzbrille zu tragen.

Polierzeit maximal 15 Sekunden. Intermittierende bzw. tupfende Arbeitsweise. Wasserkühlung ist erforderlich. Kein weiteres Poliermedium erforderlich. Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers des Mikromotors/Turbine

**Qualität:** Polyurethanpolierer mit integriertem Poliermittel

**Risiken:** Es sind keine allergischen Reaktionen von Patienten bekannt.

**Entsorgung:** Die Instrumente sind mit dem Klinikabfall zu entsorgen

**Hersteller:** DFS-DIAMON GmbH Ländenstrasse 1 D-93339 Riedenburg +49 9442 91890

Rev 11/13

CE 0297