

Clean-Orange narancs tisztítószer



*Példa kép

Alkalmazási terület:

Laboratóriumi és rendelői bútorok, valamint rozsdamentes fémfelületek tisztítására. Figyelem: egyes műanyagokat oldhatja! Lenyomati csatornák tisztítására.

Alkalmazási mód:

Vízzel hígítva, a szennyezettség mértékének megfelelően.

Minőség:

Oldja a szilikon maradványokat, az alginátot és a cink-eugenol paszta lerakódásokat, valamint a vérszennyeződéseket. Ultrahangos fürdőben nem használható.

Kockázatok:

Lenyelése esetén forduljanak orvoshoz. Kerüljék a termék bőrre és szembe kerülését, esetenként bőrirritációkat okozhat.

Ártalmatlanítás:

Tömény állapotban ne kerüljön a lefolyórendszerbe.

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany