


Clean-Orange Soluție de curățat cu miros de portocală

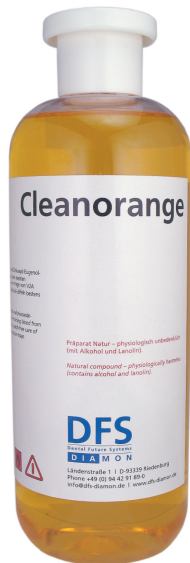

*Exemplu de imagine

Domeniu de aplicare:

Curățarea suprafețelor mobilierului de laborator și cabinet și a suprafețelor de oțel inoxidabil; curățarea lingurilor de amprentă. Precauție: poate deteriora unele suprafețe plastice.

Mod de aplicare:

Diluare cu apă, în funcție de gradul de murdărire.

Calitate:

Elimină resturile de silicon, alginat, paste de zinc-eugenol și sânge. Nu este adecvat pentru utilizare în baia cu ultrasunete.

Pericole:

În caz de înghițire adresați-vă medicului, evitați contactul cu pielea și cu ochii, poate provoca iritații ale pielii.

Eliminare:

În stare pură nu permiteți pătrunderea în canalizare.

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany