

# Gebrauchsanweisung

Copyright by DFS-Diamon GmbH

Seite 1 / 1

## Fluxur

Erstelldatum: 07.11.2013

Überarbeitet am: / /



\*Beispielabbildung

### Produktname

Fluxur, Flussmittel für alle Dentallegierungen

### Zusammensetzung

Komplexes Kalium-Hydroxo-Fluoroborat

### Anwendungsweise

Kronen- und Brückentechnik, Modellguss

### Verarbeitung

Die zu lötende Stelle metallisch blank vorbereiten. Vor dem Erhitzen mit der Flamme ausreichend Fluxur auf die warme Lötstelle aufbringen. Bis zur Rotglut weitererhitzen, wenn nötig Fluxur nachlegen. Lot auflegen, in die Lötfläche einschließen lassen und kurz nachwärmen.

Nach langsamer Abkühlung das verglaste Flussmittel mechanisch (Schleifen, Sandstrahlen) entfernen, kein Abbeizmittel verwenden!

Hierzu eignen sich rotierende Stahldrahtbürsten bestens. (Best. Nr. 60014)

Rev. 11/13



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany