

## Fluxur

### **Terméknév:**

Fluxur, folyékony szer minden fogászati ötvözethez

### **Összetétel:**

Komplex kálium-hidroxo-fluorborát

### **Alkalmazási terület:**

Korona- és hídtechnikák, modellöntés

### **Feldolgozás:**

A forrasztandó helyet fémes fényezésűre kell előkészíteni. Lánggal való felhevítés előtt vigyenek fel megfelelő mennyiségű Fluxurt a meleg forrasztási területre. Hevítsék tovább vörösen izzóra. Ha szükséges, adjanak hozzá Fluxurt. Helyezzék fel az ónt, adagolják a forrasztófugát és utána melegítsék rövid ideig.

Lassú lehűlés után távolítsák el a megüvegesedett folyékony szert mechanikusan (csiszolással, homokfúvással). Használjanak pácolószereket!

Ehhez kiválóan alkalmasak a forgó acéldrótos kefék. (Megr. szám: 60014)

### **Gyártó:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/13