

Silberleitlack GALVANET

Erstelldatum: 24.07.2014

Überarbeitet am: / /



*Beispielabbildung

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln!
Nach Gebrauch gut verschließen!

Metallische Oberflächen sind vor der Applikation zu entfetten (z.B. Alkohol)! Gipsoberflächen nur in völlig ausgetrocknetem Zustand bestreichen, diese notfalls mittels Mikrowelle trocknen. Mit einem Pinsel **einmalig** auftragen. Den Pinsel in möglichst flacher Haltung gleichmäßig und zügig in nur eine Richtung streichen, um einen gleichmäßig dünnen Film zu erhalten! Es ist **eine** deckende Schicht anzustreben. Das Nachbessern der lackierten Fläche und Pfützenbildung sind zu vermeiden! Völlig abtrocknen lassen. GALVANET ist ein sehr schnell trocknender Leitlack. Es wird jedoch eine Trockenzeit von 5 min bis zur weiteren Bearbeitung empfohlen.

Nach der Entnahme aus dem Goldbad, bei Beendigung des galvanischen Prozesses, den Gipsstumpf im Ultraschallbad mit Gipslöser auflösen. Bei direktem Aufgalvanisieren auf Metall die Galvano-Kappe vorsichtig vom Primärteil abziehen. Danach die Silberleitschicht vom Feingoldkappchen mit 30%iger Salpetersäure im Ultraschallbad entfernen.

Schutzmaßnahmen

- Von Zündquellen fernhalten.
- Berührung mit der Haut vermeiden.
- Zum Löschen kein Wasser verwenden.
- Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen.
- Schutzbrille, lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe.
- Sondermüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Eigenschaften

Entzündlich

Lagerung

Gefäß gegen Austrocknung dicht verschlossen halten.

Rev. 07/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany