

Isofix

Alkalmazási terület:

Modellezőcsontok szigeteléséhez viaszmunkák esetén a korona- és hídtechnikában.

Alkalmazási mód:

Kenjék be a csontot egyszer vékonyan a lezáróapkába integrált ecsettel és hagyják kb. 30 másodpercig hatni. A felesleges folyadékot lágyan, sűrített levegővel fúvassák le. Felvitel és/vagy viaszmerítés a megszokott módon. Használat után a palackot szorosan le kell zárni.

Minőség:

Az Isofix vékony 3-5 μ mikrofilmet képez. Kompatibilis a fogászati modellezőviaszokkal. Megkönnyíti a viaszmunka rés- és elmozdulásmentes leemelését. Meggátolja a viasz által okozott nyálkaképződést a korona belső oldalán. A beágyazó masszával nem reagál. Az Isofix oldószerektől mentes és vízzel oldható.

Tárolás:

Szorosan lezárva tárolandó.

Ártalmatlanítás:

Az általános laboratóriumi hulladékkal (üveg).

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 02/16