

Isofix

Domeniu de aplicare:

Izolarea bonturilor pe model la machetele de ceara pentru coroane și punți.

Mod de aplicare:

Ungeți bontul o dată în strat subțire cu pensula din capacul de închidere și lăsați cca. 30 de secunde să acționeze. Suflați ușor excesul de lichid cu aer comprimat. Aplicați ceara sau scufundați în ceară în modul obișnuit. După folosire închideți din nou bine tubul.

Calitate:

Isofix formează un microfilm subțire de 3-5 μ . Compatibil cu cerurile de modelare dentare. Ușurează ridicarea fără decalaje și deformări a machetei de ceară. Împiedică formarea dungilor cauzate de ceară pe partea interioară a coroanei. Nu intră în reacție cu masa de ambalat. Isofix nu conține solvenți și este solubil în apă.

Depozitare:

Depozitați bine închis.

Eliminare:

Cu deșeurile generale de laborator (sticlă).

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 02/16