

Ausblockwachs, korallrot



*Beispielabbildung

Anwendungsbereich

Zum Ausblocken untersichgehender Bereiche in der Modellgusstechnik.

Bitte beachten Sie: Ausblockwachs, korallrot ist nicht als Gusswachs geeignet!

Anwendungsweise

Beim Auftrag an untersichgehenden Bereichen am Gipsmodell haftet das Ausblockwachs sicher, und lässt sich anschließend leicht und sauber schaben.

Qualität

Ausblockwachs mit hoher Haftkraft

Farbe: korallrot

Härte: weich

Schmelztemperatur: ca. 51°C / 123,8°F

Risiken

Heiße Wachstropfen auf der Haut schnellstmöglich unter fließend kaltem Wasser abkühlen, um das erstarrte Wachs anschließend vorsichtig abziehen.

Lagerung

- Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, trocknen, gut belüfteten Ort aufbewahren
- Vor Sonneneinstrahlung schützen
- Optimale Lagertemperatur: 5 –30 °C

Entsorgung

Vollständig entleerte Verpackungen können dem Recycling-Verfahren zugeleitet werden

Rev. 10/24



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany