

## Cera de bloqueo, rojo coral

Fecha de creación: 25.10.2024

Revisado el: 



\*Ejemplo de ilustración

### Ámbito de aplicación

Para bloquear zonas socavadas en la técnica de colado de modelos.

Atención: la cera block-out rojo coral no es adecuada como cera de colado.

### Método de aplicación

La cera de bloqueo se adhiere firmemente cuando se aplica a las zonas socavadas del modelo de yeso y puede rasparse fácil y limpiamente.

### Calidad

Cera de bloqueo con gran fuerza adhesiva

**Color:** rojo coral

**Dureza:** blanda

**Temperatura de fusión:** aprox. 51°C / 123,8°F

### Riesgos

Enfríe las gotas de cera caliente sobre la piel lo antes posible bajo un chorro de agua fría y, a continuación, despegue con cuidado la cera solidificada.

### Almacenamiento

- Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado
- Proteger de la luz solar
- Temperatura óptima de almacenamiento: 5 -30 °C

### Eliminación de residuos

Los envases completamente vacíos pueden enviarse a reciclar

Rev. 24/10



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Alemania