

Diamantspray



*Beispielabbildung

Anwendungsbereich

Diamantspray für die Hochglanzpolitur von Keramik und Kompositen sowie für die Sekundärteile von Teleskopen und Geschieben (insbesondere NEM-Legierungen).

Anwendungsweise

Vor Gebrauch mehrmals kräftig schütteln!

Das Spray in einem Abstand von ca. 5-8cm auf die zu polierende Fläche aufbringen und den Poliervorgang durchführen. Je nach gewünschtem Polierergebnis diesen Vorgang beliebig oft wiederholen.

Qualität

DFS Diamantspray beinhaltet feinste Diamantkörnungen von 3-5 µm und gewährleistet somit hochglänzende Oberflächen bei Keramik- und Kompositmaterialien sowie bei Sekundärteilen von Teleskopen und Geschieben für eine optimale Passung und Friktion, ohne Verlust der Oberflächenstruktur.

Risiken

Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel.

Lagerung

- Dose steht unter Druck.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen, Explosionsgefahr.
- Vor Erwärmung über 50°C schützen.

Entsorgung

Mit dem allgemeinen Laborabfall (Blechdosen)

Rev. 10/19



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany