

Kerafire

12 g, Bestellnr.: 24040

Erstelldatum: 01.03.2023

Überarbeitet am: 



*Beispielabbildung

Anwendungsgebiet

Zur Fixierung von Keramikarbeiten während des Brennvorgangs.
Auch zur Fixierung von Objekten beim Löten einsetzbar.

Technische Beschreibung

Feuerfeste Paste zur Stabilisierung von Keramikarbeiten im Brennofen.
Bestehend aus feuerfesten Fasern mit Lösungsmitteln und einem organischen Polymer.
Plastikspritze, gefüllt mit der Paste und verschlossen mit einem roten Verschlussstopfen.

Inhalt: 12 g / Gesamtgewicht: 20 Gramm

Länge: 17 cm, Durchmesser: 2 cm

Nur für den professionellen Gebrauch durch Zahntechniker

Kein Medizinprodukt, nicht zur intraoralen Anwendung

Anwendung

- Material aus der Spritze entnehmen und Objekt mit der Paste auf den Haltestiften oder direkt auf dem Brenngutträger fixieren
- Nach Entnahme sofort wieder mit dem Verschlussstopfen verschließen
- Nach dem Brand manuell oder mit Druckluft entfernen

Eigenschaften

- Eine hitzebeständige, feuerfeste, stabile und cremige Brennpaste für alle Keramikbrände bis 1500C°
- Leicht anzuwenden und beliebig formbar
- Verhindert Brandverzüge
- Verursacht keine Verunreinigungen oder Verfärbungen auf den Objekten
- Sehr leicht mit Druckluft zu entfernen
- Benötigt keine Trocknungszeit

Lagerung

Fest verschlossen, kühl und trocken lagern

Rev. 01/2023



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany