

Modellierwachs, neon-grün



*Beispielabbildung

Anwendungsbereich

Speziell für Vollkeramiksysteme sehr gut geeignet. Ideales Modellierwachs für sämtliche Anwendungsbereiche in der Zahntechnik.

Anwendungsweise

Hohe Standfestigkeit und niedriger Schmelzbereich ermöglichen präzises Aufwachsen sowohl mit elektrischem Wachsmesser, als auch in herkömmlicher Weise. Dank des rückstandsfreien Verbrennens und der geringen Kontraktion, sehr gut zur Modellation von Inlays, Onlays und Kronen in der Presstechnik geeignet. Durch die innere Festigkeit ist das Wachs sauber zu schaben und hinterlässt stets eine glatte Oberfläche.

Qualität

Modellierwachs mit hoher Standfestigkeit, schneller Abkühlzeit, niedrigem Schmelzbereich und geringer Kontraktion.

Farbe: neon-grün

Härte: medium

Schmelztemperatur: ca. 55°C / 131°F

Für Presskeramik geeignet!

Risiken

Heiße Wachstropfen auf der Haut schnellstmöglich unter fließend kaltem Wasser abkühlen, um das erstarrte Wachs anschließend vorsichtig abziehen.

Lagerung

- Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, trocknen, gut belüfteten Ort aufbewahren
- Vor Sonneneinstrahlung schützen
- Optimale Lagertemperatur: 5 –30 °C

Entsorgung

Vollständig entleerte Verpackungen können dem Recycling-Verfahren zugeleitet werden.

Rev. 10/24



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany