


SynaRock ARTI

25 kg, Bestellnr.: 28030-Arti

Erstelldatum: 27.01.2023

Überarbeitet am: 



*Beispielabbildung

Anwendungsgebiet

Schnell abbindender Artikulationsgips, auch für Vorwälle und Frässockel einsetzbar.

Technische Beschreibung

Ein Naturgips der Klasse II:I mit sehr geringer Expansion. (Typ 2 Klasse 1 ISO 6873)

Präzise Fixierung der Modelle beim Einartikulieren.

Rationelles Arbeiten durch kurze Abbindezeit.

Verarbeitungszeit: (bei ca. 20°C) 1,5 Min

Entformbar: nach 3 Min

Abbinde-Expansion: nach 2 h < 0,01%

Druckfestigkeit: nach 1 h ca. 25 N/mm² (MPa)

Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Wasserfaktor von 100g Pulver : 30ml destilliertem Wasser.

Rührzeit: 30 sek. per Hand

Anwendung

- Geben Sie das Pulver gemäß dem empfohlenen Mischungsverhältnis zu destilliertem Wasser.
- Benutzen Sie immer saubere Instrumente.
- Mischen Sie das Produkt nicht in einem Behältnis, in dem Einbettmassen angemischt wurden.
- Benutzen Sie immer destilliertes Wasser. Leitungswasser kann die Abbindezeit verändern.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und Staubschutzmaske. Atmen Sie den Staub nicht ein.
- Verarbeiten Sie das Produkt nur in gut belüfteten Räumen.

Eigenschaften

Hohe Klebkraft und ausgezeichnetes Stehvermögen.

Farbe: weiß

Lagerung

Fest verschlossen und trocken lagern.

Nach Gebrauch verschließen, um Kontakt mit Feuchtigkeit zu vermeiden.

Rev. 01/2023



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany